

ITALIANO

iCare IC100




Guida rapida

icare


RX Only (U.S.)

Accensione del tonometro, caricamento della sonda e misurazione

1. Premere il tasto di selezione o di misurazione per accendere il tonometro. Figure che mostrano questi modi alternativi di avvio: (ricordarsi di usare il cinturino da polso)

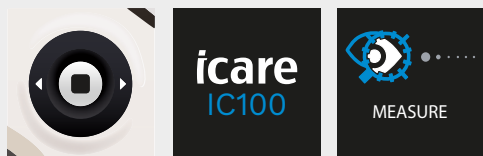

Pressione del pulsante di selezione per avviare.

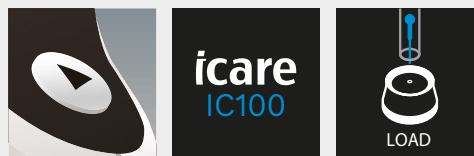


Pressione del pulsante di misurazione per avviare.


2. Aprire il tubo della sonda rimuovendo il coperchio e inserire la sonda nell'apposita base, come illustrato nella figura.




3. Quando il simbolo di riproduzione appare sul display, il tonometro è pronto per le misurazioni.

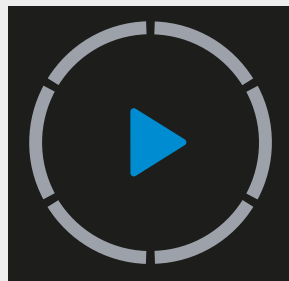

4. Invitare il paziente a rilassarsi e a guardare dritto davanti a sé, verso un punto specifico. Avvicinare il tonometro all'occhio del paziente.

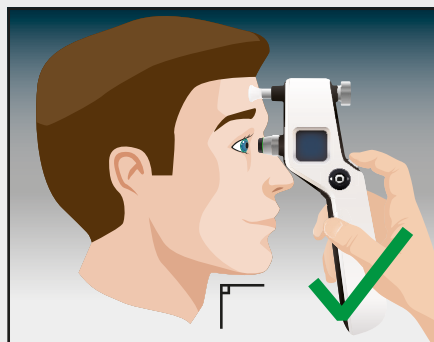

5. Mantenere la sonda in posizione orizzontale e perpendicolare rispetto al centro della cornea. La distanza dalla punta della sonda al centro della cornea del paziente deve essere di 4-8 mm. La spia sulla base della sonda deve essere di colore verde.

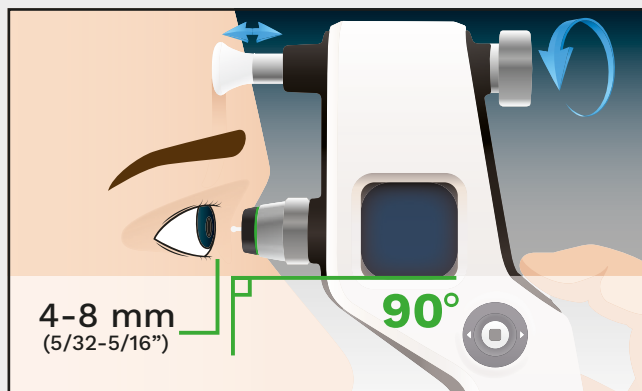

Spia sulla base della sonda di colore verde

6. Premere il pulsante di misurazione per misurare la PIO. La sonda verrà a contatto con l'occhio durante le misurazioni: tenere premuto il pulsante di misurazione per eseguire 6 misurazioni consecutive OPPURE premere brevemente il pulsante 6 volte per eseguire una misurazione per volta.



Un segnale acustico breve

Indica una misurazione singola corretta.


Segnale acustico doppio

Indica una misurazione singola errata (vedere i messaggi di errore nel manuale completo).

Segnale acustico prolungato

Indica che sono state eseguite correttamente sei misurazioni e che il risultato della PIO è disponibile sul display.

Display durante le misurazioni

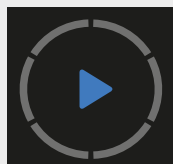

Prima




Dopo la seconda misurazione



Dopo la sesta misurazione




Dopo la sesta misurazione ma con variazione accettabile

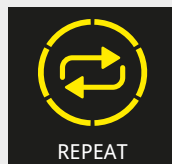

Dopo la sesta misurazione ma con troppa variazione

Componenti del tonometro

1. Rotellina di regolazione del supporto per la fronte
2. Display
3. Pulsante di misurazione
4. Pulsante di selezione
5. Supporto per la fronte
6. Base della sonda e spia sulla base della sonda
7. Colletto
8. Tasti direzionali

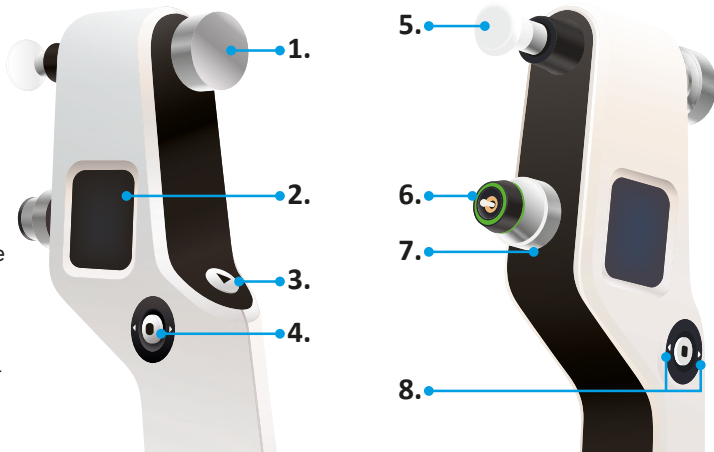

Sostituzione della base della sonda

1. Disattivare l'alimentazione del tonometro.
2. Svitare manualmente il colletto della base della sonda e sistemarlo in un luogo sicuro.
3. Tirare la base della sonda con le dita fino a estrarla completamente dal tonometro.
4. Inserire una nuova base della sonda nel tonometro.
5. Avvitare il colletto fino al blocco completo della base della sonda.



 **Icare Finland Oy**
Äyritie 22
01510 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 8775 1150
info@icare-world.com

 0598



Per ulteriori informazioni,
leggere il manuale di istruzioni.

www.icare-world.com

icare

iCare è un marchio registrato di Icare Finland Oy, Centervue S.p.A., Icare Finland Oy e Icare USA Inc. fanno parte di Revenio Group e rappresentano il marchio iCare. Si ricorda che non tutti i prodotti, i servizi o le offerte a cui si fa riferimento in questa brochure sono approvati o commercializzati in tutti i mercati; inoltre, l'etichettatura e le istruzioni approvate potrebbero variare da un paese all'altro. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche nella progettazione e nell'ambito della consegna; inoltre potrebbero variare a seguito di sviluppi tecnici in corso.